

# Curan Lady

Le cathéter spécialement conçu pour les femmes





# Curan Lady

Pour une vie active et sociale

## Discret, confortable et hygiénique

Le Curan Lady est un cathéter compact et pratique, spécialement conçu pour les femmes. Depuis son introduction, nous ne cessons d'améliorer l'expérience des utilisatrices sur la base des retours d'expérience et idées des utilisatrices comme des soignants. Grâce à tout cela, le modèle du Curan Lady est plus élégant et discret que jamais.

Sa forme compacte permet d'emporter le Curan Lady facilement et discrètement dans votre sac ou poche. De ce fait, ce cathéter est adapté à une utilisation chez soi ou ailleurs. Après utilisation, vous emportez le cathéter en toute sécurité et hygiéniquement dans son emballage étanche. Voilà comment l'utilisation du Curan Lady s'adapte parfaitement à votre vie quotidienne.


### Les principaux avantages

- ✓ **Modèle compact et discret**
- ✓ **Prêt à l'emploi grâce à son revêtement hydrogel**
- ✓ **Introduction souple grâce à sa forme ergonomique**
- ✓ **À emporter et à jeter en toute discrétion**
- ✓ **À utiliser avec toutes les poches d'urine**
- ✓ **Entièrement recyclable**



« Je vis ma vie  
comme avant  
mon cathéter et je  
sors beaucoup. »

- Irma Smits

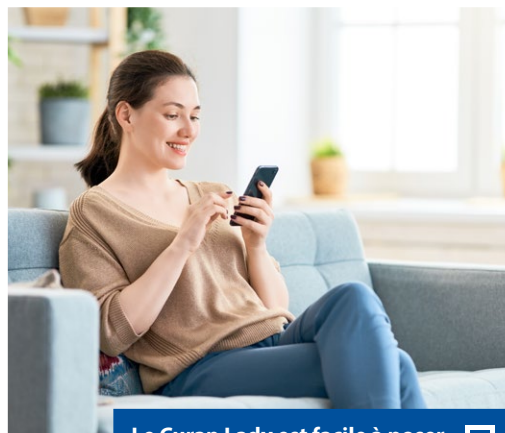

Le Curan Lady est facile à poser  
et à utiliser. Regardez la vidéo  
d'instruction ou commandez  
un exemplaire pour essayer.







### Spécification

<b>Longueur totale du cathéter</b>	12 cm
<b>Type d'utilisation</b>	Unique
<b>Type d'ouverture</b>	Nelaton
<b>Type de cathéter</b>	Intermittent

### Hygiénique pendant et après l'emploi

Le Curan Lady est conçu pour pouvoir être refermé hermétiquement après son utilisation. Si vous n'avez pas la possibilité de jeter le cathéter, vous l'emportez simplement dans votre sac ou poche.

### Prêt à l'emploi grâce au revêtement hydrogel

Vous pouvez utiliser le Curan Lady tout de suite après son déballage, après avoir lavé ou désinfecté vos mains.

### Introduction sans irritation ou gêne

La forme ergonomique permet une introduction confortable et indolore du cathéter, sans risque ou irritation. Le revêtement hydrogel améliore le confort d'introduction et évite les problèmes d'éclaboussures ou de gouttes pendant l'introduction ou l'enlèvement du cathéter.

### Emballage compact et discret

L'emballage discret ne permet pas de voir qu'il s'agit d'un cathéter. En outre, il s'ouvre et se ferme sans bruit, pour une utilisation discrète dans les lieux publics.

### Informations destinées aux professionnels:

Le Curan Lady mesurent 12 cm et sont disponibles dans les tailles de charrière suivantes:

#### Curan Lady PVC

Code du produit	Taille	Emballage	Couleur
CL08 Compact ready-to-use female device	CH08	Boîte de 30	■ Bleu
CL10 Compact ready-to-use female device	CH10	Boîte de 30	■ Noir
CL12 Compact ready-to-use female device	CH12	Boîte de 30	□ Blanc
CL14 Compact ready-to-use female device	CH14	Boîte de 30	■ Vert

#### Curan Lady sans PVC

Code du produit	Taille	Emballage	Couleur
TCL08 Compact ready-to-use female device PVC-free	CH08	Boîte de 30	■ Bleu
TCL10 Compact ready-to-use female device PVC-free	CH10	Boîte de 30	■ Noir
TCL12 Compact ready-to-use female device PVC-free	CH12	Boîte de 30	□ Blanc
TCL14 Compact ready-to-use female device PVC-free	CH14	Boîte de 30	■ Vert



Ne laissez pas un problème de vessie diminuer votre qualité de vie.  
Curan développe des cathéters qui s'adaptent à votre style de vie.

Découvrez notre gamme étendue sur :

**[www.curan.eu](http://www.curan.eu)**

### Qualité et sécurité optimales

Lors du développement des cathéters, Curan vise une qualité et sécurité maximales. La sécurité et les performances de nos cathéters sont très soigneusement testées, évaluées et documentées. Aussi garantissons-nous le même confort fiable à chaque utilisation. Nos produits sont détenteurs du certificat CE et ISO13485 ; une reconnaissance officielle du fait que nous fabriquons et commercialisons des produits médicaux sûrs.



**Curan Medical BV**  
Barlhammerweg 26

7006 GE Doetinchem  
The Netherlands

**Tel.** +31 (0)314 39 27 25  
**E-mail** [info@curan.eu](mailto:info@curan.eu)

**Follow us on:**

